



# AVANZANDO JUNTOS

CON MASCARILLAS FACIALES MÉDICAS  
CERTIFICADAS TIPO II (EN 14683)

FREUDENBERG  
FILTRATION TECHNOLOGIES



Supported by:



Federal Ministry  
for Economic Affairs  
and Energy

on the basis of a decision  
by the German Bundestag

 **FREUDENBERG**  
INNOVATING TOGETHER

# PROTECCIÓN Y COMODIDAD PARA TODOS. EN TODO MOMENTO.

## Máxima calidad – Made in Germany

Como especialista global en filtración y mayor productor alemán de tela no tejida (TNT) tenemos las máximas exigencias de calidad en nuestros productos. El desarrollo y la producción de las mascarillas faciales médicas se realiza en Alemania.

## Comodidad de uso

La estructura especial de tres capas protectoras reduce la liberación de gotas al medio ambiente y, al mismo tiempo, permite respirar fácilmente. La suave tela no tejida ofrece una comodidad óptima incluso en caso de uso prolongado. La tolerancia cutánea ha sido evaluada por Dermatest como «muy buena». Todos los materiales empleados están exentos de látex.

## Forma ajustable individualmente

Gracias a sus pliegues y a la pinza nasal, estas mascarillas de talla única se pueden ajustar individualmente a la forma de la cara. Las tiras redondas de las orejas proporcionan una sujeción cómoda.



## Materiales conformes con LABS

Todos los materiales son conformes con LABS de acuerdo con las especificaciones de la clase de prueba B según VDMA 24364. Por consiguiente, estas mascarillas faciales también se pueden utilizar en entornos industriales donde se realicen trabajos de lacado.

## Mascarillas faciales médicas TIPO II (EN 14683)

Los test de laboratorios realizados por institutos externos confirman una eficacia de filtración bacteriana (BFE) > 98 % y, por consiguiente, una elevada retención de aerosoles con virus y bacterias. Las mascarillas están concebidas para un solo uso.



TRANSPIRABLE




SUAVE



3 CAPAS

## USO SEGURO

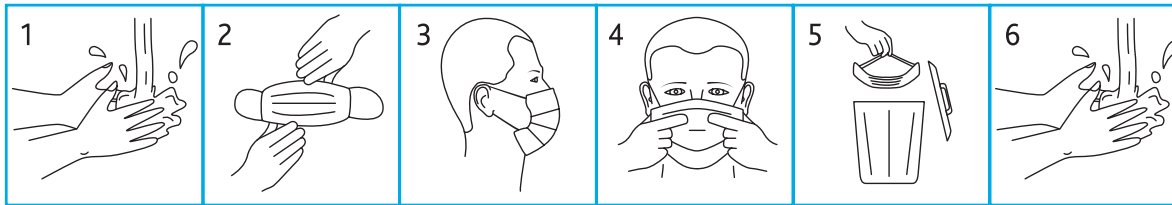

### Por favor, tenga presente:

Se recomienda colocar la mascarilla directamente sobre la piel. Manipular y poner /quitar solo con las manos limpias.

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Despliegue la mascarilla antes de colocarla sobre la boca y la nariz.
3. La pinza nasal debe situarse en la parte superior. Ajuste la cinta alrededor de las orejas, sin cruzarlas.
4. Presionar la pinza con ambas manos para ajustarla a la nariz y verifique que no hay espacios entre la cara y la mascarilla.
5. Cada mascarilla es desechable. Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h / día. En caso que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituir por otra nueva. Se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico.
6. Para evitar la contaminación retirar la mascarilla cogiendo las cintas y sin tocar la parte frontal. Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica después de desecharla.





Gabinete Técnico – Diseño Industrial  
Suministros  
Filtración industrial

# MATEXNOR, S.L.

Polígono POCOMACO  
Sector E, Nave 18-1  
15190 – A CORUÑA

Telf. 981 081 989  
[matexnor@matexnor.com](mailto:matexnor@matexnor.com)

Composición de las fibras: 100 % polipropileno  
Cualquier posible cambio de color no influye en la función. Almacenar en un lugar limpio y seco evitando el calor y la luz solar directa.



 **FREUDENBERG**  
INNOVATING TOGETHER

Artículo

Mascarilla facial médica

HyMa-M-1520-FFT